

# Återanvändning av engångsvisir, instruktion för desinfektion

Fastställd av hälso- och sjukvårdsdirektören (HS 2020-00255) mars 2020 giltig till april 2021

Utarbetad av biträdande regionchefläkare

## Syfte

Säkerställa tillgång av visir/stänkskydd.

## Bakgrund

I en situation där brist på visir riskerar att ställa personal utan denna skyddsutrustning vid vård av patienter där sådan skyddsutrustning krävs, har arbetsgivaren gjort bedömningen att återanvändning av desinfekterade visir är att föredra framför inget stänkskydd alls. Av detta skäl har denna instruktion för desinfektion av visir tagits fram.

## Arbetsbeskrivning vid desinfektion av engångsvisir

1. Desinfektera händerna med handsprit.
2. Tag på skyddshandskar.
3. Desinfektera visir med skalmar med ytdesinfektionsmedel med tensid.
4. Häng upp eller placera visiret så det kan torka.
5. Tag av skyddshandskar.
6. Desinfektera händerna med handsprit.

Visiret kan återanvändas så länge sikten genom det är klar.

## Innehållsansvariga

Ingemar Qvarfordt

Elisabeth Eriksson Gebring