

Instruktion för avtagning och rengöring av visir.



- Sprita händerna med handdesinfektion.



- Ta av visiret bakifrån.
Om visiret inte kan desinficera på plats läggs det lämpligast i en påse och tas med till lämplig avsedd plats.



- Lägg visiret på en plan yta som tål att desinfekteras.
- Ta på handskar. Blöt en torkduk med ytdesinfektionsmedel.



- Börja med att desinfektera visirets insida.



- Lyft upp visiret medan bordsytan desinfekteras, därefter läggs visiret tillbaka med insidan mot bordsytan.



- Desinfektera därefter visirets utsida.